

Kod	Komunikat	Czynności sprawdzające
W001	Polecenie niemożliwe, zakończ bieżące czynności.	Zakończ ruchy, odłóż instrumenty na miejsce.
W002	Nie rozpoznano wózka (Cart).	Sprawdź zasilacz, połączenia elektryczne i kable między płytą fotela a stolikiem.
W050	Odlóż instrumenty na miejsce.	Instrumenty do dezynfekcji muszą być w pozycji spoczynkowej.
W051	Nie wyciągnięto żadnego instrumentu.	Wybierz instrument, kubek lub ssaki przed cyklem.
W057	Wyciągnij wszystkie instrumenty.	Zrestartuj cykl z tymi samymi instrumentami, które były wyciągnięte.
W059	Wyciągnij przynajmniej jeden instrument.	Wykonaj cykl z wybranymi instrumentami lub kubkiem.
W060	Brak H2O2, napełnij zbiornik.	Napełnij zbiornik H2O2, sprawdź płytę, sondę i przepływomierz.
W061	Przerwa w dezynfekcji anulowana.	Brak dalszych czynności.
W062	Dezynfekcja ukończona z niewystarczającym czasem trwania.	Brak dalszych czynności.
W063	Brak H2O, napełnij zbiornik.	Napełnij zbiornik wody.
W064	Brak H2O2, napełnij zbiornik.	Napełnij zbiornik H2O2, sprawdź płytę i sondę.
W065	Otwórz kurki sprayu H2O.	Sprawdź kurki sprayu i czujnik objętościowy.
W066	Wyłącz butelkę H2O.	Wyłącz funkcję zasilania z butli.
W067	Nie można napełnić zbiornika 1. Otwórz kurek wody.	Otwórz kurek; jeśli otwarty, sprawdź sondę maksymalną zbiornika 1.
W068	Nie można napełnić zbiornika 2. Otwórz kurek wody.	Otwórz kurek; jeśli otwarty, sprawdź sondę maksymalną zbiornika 2.
W100	Instrument podniesiony przy włączonym sterowniku nożnym	Puść sterownik, aktywuj instrument, sprawdź sterownik.
W101	Odlóż instrumenty na miejsce.	Umieść instrumenty w pozycji spoczynkowej.
W102	Instrument niepodłączony.	Sprawdź połączenia.
W103	Wyciągnij instrumenty.	Powtórz żądanie płukania z wyciągniętymi instrumentami.
W104	Brak H2O, napełnij zbiornik.	Dolej wody destylowanej do właściwego zbiornika.
W105	Cykl nieukończony poprawnie, powtórz płukanie.	Ponów cykl płukania.
W106	Wyłącz butelkę H2O.	Ponów płukanie z wybraną wodą z sieci.
W107	Włącz butelkę H2O.	Ponów płukanie z wybraną butelką pod ciśnieniem.
W108	Błąd połączenia z Apex, przerwij czynności.	Sprawdź połączenie typu jack.
W150	Odlóż rękawy ssące na miejsce.	Umieść rękawy ssące w pozycji spoczynkowej.
W151	Odlóż instrumenty na miejsce.	Umieść instrumenty w pozycji spoczynkowej.
W200	Interferencja ramienia.	Sprawdź ramię asysty, usuń przyczynę nacisku na mikroprzełącznik.
W202	Wykonaj kalibrację misy.	Przeprowadź kalibrację wyłączników krańcowych misy.
W203	Kalibracja misy OK.	Brak czynności.
W204	Kalibracja misy NIE OK.	Powtórz kalibrację misy.

W206	Wyłącz butelkę H2O.	Odznacz butelkę.
W207	Napełnij butelkę.	Napełnij butlę lub odznacz jej użycie.
W208	Płukanie rękawów ssących przerwane.	Powtórz procedurę płukania.
W209	Sprawdź czy rękawy są otwarte i filtr czysty.	Sprawdź końcówki, wakuometry, rurki Venturiego i filtry.
W210	Płukanie rękawów ssących zakończone.	Brak czynności.
W211	Zmiana źródła wody niedozwolona.	Brak czynności.
W212	Zbiornik środka dezynfekującego pełny.	Sonda przelewu jest zakryta.
W253	Wykonaj konserwację.	Termin przeglądu minął, wezwij serwis.
W350	Wykonaj kalibrację sterownika nożnego.	Przeprowadź kalibrację pedału.
W351	Kalibracja sterownika OK.	Brak czynności.
W352	Podłącz kabel sterownika nożnego.	Podłącz przewód pedału.
W353	Odłącz kabel sterownika nożnego.	Odłącz przewód pedału.
W355	Włącz sterownik nożny.	Brak czynności.
W356	Kalibracja sterownika NIE OK.	Powtórz kalibrację pedału.
W357	Zaktualizuj FW płyty sterownika nożnego.	Zaktualizuj oprogramowanie pedału.
W358	Podłącz kabel do bezprzewodowego sterownika.	Podłącz przewód do pedału bezprzewodowego.
W359	Zaktualizuj FW płyty głównej (host).	Zaktualizuj oprogramowanie płyty hosta.
W400	Interferencja podstawy fotela.	Usuń przeszkodę spod podstawy fotela.
W401	Interferencja oparcia fotela.	Usuń przyczynę nacisku na oparcie.
W402	Wykonaj kalibrację fotela.	Przeprowadź kalibrację fotela.
W403	Cykl dezynfekcji aktywny, fotel zablokowany.	Czekaj na koniec cyklu lub odłóż instrumenty.
W406	Przesuń misę.	Ustaw misę ręcznie poza strefę interferencji.
W407	Kalibracja fotela NIE OK.	Powtórz kalibrację.
W408	Kalibracja fotela OK.	Brak czynności.
W409	Interferencja siedziska fotela.	Sprawdź osłony pod fotelem lub ramię asysty (zależnie od modelu).
W410	Aktywowana interferencja Side Delivery.	Usuń przyczynę nacisku na moduł boczny.
W411	Fotel zablokowany, odłóż instrument.	Odłóż instrument, aby umożliwić programy automatyczne.
W412	Fotel zablokowany, odłóż instrument.	Wyłącz instrument, aby umożliwić ruchy ręczne lub automatyczne.
W413	Blokada fotela aktywowana.	Użyj odpowiedniego przycisku, by zdjąć blokadę.
W415	Interferencja osłony oparcia.	Usuń przeszkodę (dozwolone tylko ruchy w górę).
W416	Interferencja podnóżka.	Usuń przeszkodę (dozwolone tylko ruchy w górę).

W417	Interferencja podpórki nóg.	Usuń przyczynę nacisku na podpórkę nóg.
W418	Interferencja rotacji.	Usuń przeszkodę blokującą obrót.
W424	Przesuń fotel w dół.	Opuść fotel poza strefę interferencji, by ruszyć misą.
W425	Przywrócono dane domyślne.	Brak czynności.
W427	Formatowanie systemu plików.	Formatowanie zakończone.
W428	Misa zatrzymana, wykryto przeszkodę.	Usuń obiekt blokujący ruch misy.
W430	Przegrzanie silnika siedziska.	Poczekaj na schłodzenie; jeśli błąd trwa, sprawdź inwerter lub silnik.
W431	Błąd systemu, zrestartuj.	Wyłącz i włącz urządzenie.
W432	Ruch przesuwny (sliding) reaktywowany.	Brak czynności.
W434	Zabezpieczenie ramienia stolika aktywne.	Sprawdź połączenia i ciągłość obwodu ramienia.
W435	Program zapisany w strefie bez kolizji.	System automatycznie skorygował zapisaną wysokość fotela.
W500	Kończy się miejsce na dysku lokalnym.	Brak czynności.
W501	Niewystarczająca ilość miejsca na dysku lokalnym.	Brak czynności.
W502	Dysk lokalny brakujący lub uszkodzony.	Brak czynności.
W503	Nieprawidłowy format dysku lokalnego.	Brak czynności.
W504	Błędy na dysku lokalnym; funkcje wyłączone.	Brak czynności.
W505	Błędy pamięci USB; funkcje wyłączone.	Podłącz do PC, aby naprawić błędy.
W700	Wyciągnij instrument przy zablokowanym pedale.	Puść sterownik, aktywuj instrument, sprawdź sterownik.
W701	Odlóż instrumenty dentysty na miejsce.	Umieść instrumenty w pozycji spoczynkowej.
W702	Instrument niepodłączony.	Sprawdź połączenia.
W703	Wyciągnij instrumenty.	Ponów żądanie płukania z wyciągniętymi instrumentami.
W704	Brak H ₂ O, napełnij zbiornik.	Dolej wody destylowanej do zbiornika.
W705	Cykl nieukończony, powtórz płukanie.	Ponów cykl płukania.
W706	Wyłącz butelkę H ₂ O.	Ponów płukanie z wodą z sieci.
W707	Włącz butelkę H ₂ O.	Ponów płukanie z butelką pod ciśnieniem.
E408	Problem sprzętowy płyty fotela	USUŃ sterownik nożny z klapy pod fotelem